




5. A Porlasztófej cseréje

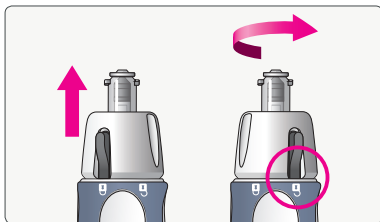

1. Miközben benyomva tartja a Porlasztófejzárát, fordítsa el a "nyitva" pozícióig.

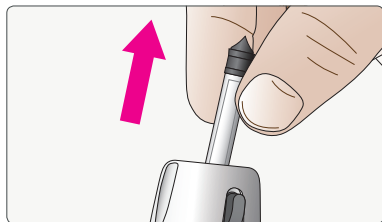


4. Távolítsa el a Porlasztófej belső részét és dobja az otthoni hulladékgyűjtőbe.

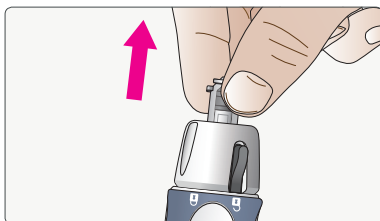


2. Határozott egyenes mozdulattal húzza ki a Porlasztófejet az InsuJet™ eszközből.


Tipp: A könnyebb eltávolítás érdekében először csatlakoztassa az Adaptert a Porlasztófejhez.

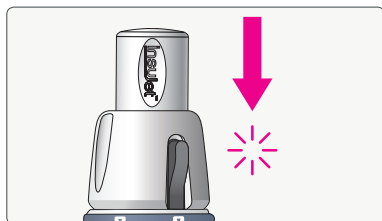

5. Határozottan helyezzen be egy új Porlasztófejet az InsuJet™ eszközbe. Hallania és éreznie kell egy kattantást, amikor a helyére kerül.

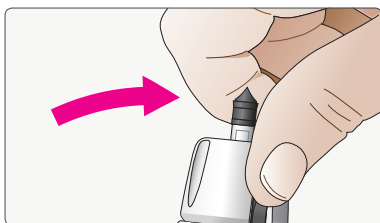

3. Lazítsa meg a Porlasztófej belső részét, határozottan az egyik irányba nyomva.

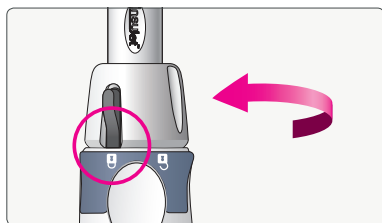

6. Amikor a helyére került a Porlasztófej, akkor a zárat fordítsa vissza a "zárt" pozícióba.

Szimbólumok jegyzéke

 OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN

 FIGYELMEZTETÉS

 GYÁRTÓ


 GYÁRTÁSI TÉTELSZÁM

 LEJÁRATI IDŐ

 AZ ESZKÖZT ETHYLENE-
OXIDDAL STERILEZTÉK

 HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY

 NE HASZNÁLJA A TERMÉKET,
AMENNYIBEN A CSOMAGOLÁS SÉRÜLT.

 NE STERILIZÁLJA ÚJRA.

insuJet™
Nagynyomású Inzulínadagoló Rendszer

Fogyóeszköz- információk



- A csomagolás steril fogyóeszköz-kiegészítőket tartalmaz, melyek az InsuJet™ eszközzel való használatra lettek kifejlesztve.
- Kérjük, használat előtt minden esetben olvassa el a mellékelt használati útmutatót.
- A használati útmutatót tárolja biztonságos helyen.
- Ez a csomag csak egyféle fogyóeszközt tartalmaz.


European Pharma Group BV


ISO 13485 certified

Euro Offices Building 3rd Floor
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, The Netherlands

www.insujet.com | info@insujet.com


 **0459**

017303-HU-6.1
2018 október 30



1 Figyelmeztetések

- A csomagolás külső oldalán ellenőrizze a lejáratí időt. Ne használjon fel fogyóanyagot a lejáratí időn túl.
- Ellenőrizze, hogy a fogyóanyagok csomagolása bontatlan-e. Soha ne használjon felbontott csomagolású terméket.
- Soha ne használja ugyanazt a Porlasztófejet eltérő inzulinokkal.

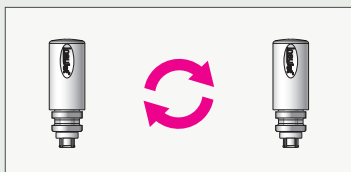




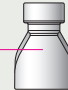
- Cserélje rendszeresen a Porlasztófejet. Soha ne használja 56 beadásnál többször vagy 14 napnál hosszabb ideig. Minden esetben javasolt a Porlasztófej cseréje, amikor új inzulintartályt vesz használatba. A Porlasztófejnek az előírtnál hosszabb ideig történő használata inzulinfolyáshoz, az eszköz meghibásodásához és a jótállás elvesztéséhez vezethet.
- Cserélje le a Porlasztófejet, ha 3 napnál hosszabb ideig nem használta az eszközt.
- A Porlasztófejet egyéni használatra tervezték, ne ossza


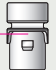

meg eszközt senkivel.

- Ne érjen az Adapter belsejében levő tűhöz.
- Mindig az inzulin kiszerezésének megfelelő Adaptert használja. Használat után az üres inzulintartályt és az Adaptert helyezze a hulladékgyűjtőbe.
- Használati hőmérséklet határok:



2 Beazonosítás


Porlasztófej REF 01075	10mL Adaptor REF 01065
	
	

3mL Adapter REF 01055	
	
	


CE 0459

3 Adapterek előkészítése


A REF 01065 3ml-es Adapter előkészítése

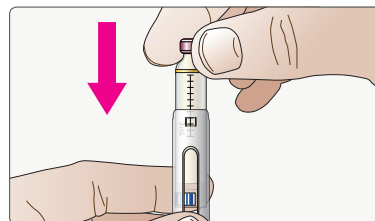

1. Csúsztassa az inzulintartályt a műanyag tartóba a tartály aljával lefelé.

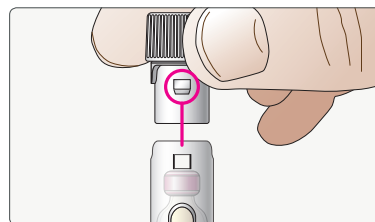


2. Helyezze az Adaptert a tartály tetejére, és győződjön meg róla, hogy az Adapter tűskéi és a nekik megfelelő lyukak a helyes pozícióban vannak-e.

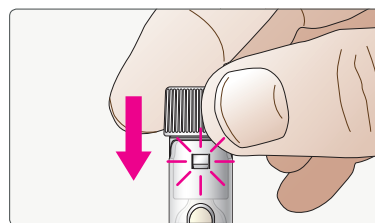

3. Határozottan nyomja össze a tartályt és az Adaptert. Az Adapter a tartón kell maradjon.


A REF 01065 10ml-es Adapter előkészítése

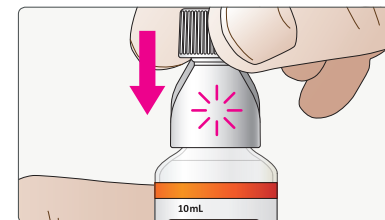

Nyomja össze az 10ml-es inzulintartályt a megfelelő Adapterrel, amíg az a helyére nem ugrik. Az Adapternek a tartályon kell maradnia.

4. Csatlakoztassa az Adaptert a Porlasztófejhez.

A 01055 vagy 01065 Adapter csatlakoztatása a 01075 Porlasztófejhez

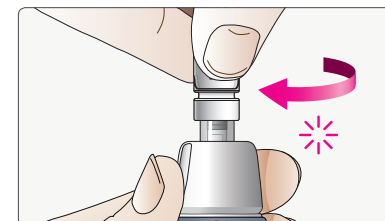

Align the Adaptor with the Nozzle and firmly rotate the Adaptor clockwise until the Adaptor snaps in place.

To remove the Adaptor, rotate the Adaptor counter-clockwise.