

Szimbólumok jegyzéke



OLVASSA EL A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT



FIGYELMEZTETÉS



GYÁRTÓ



HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY



European Pharma Group BV

Euro Offices Building 3rd Floor
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, The Netherlands

www.insujet.com | info@insujet.com



017403-HU-2.1
2018 október 30

insuJet™


Nagynyomású Inszulinadagoló Rendszer

Komfortgyűrű- információ

- Kérjük, olvassa el a dobozban elhelyezett használati útmutatót, mielőtt használni kezdené az InsuJet™ eszközt.
- Az Insujet™ eszköz használati útmutatóját tárolja biztonságos helyen.




Komfortgyűrű használata

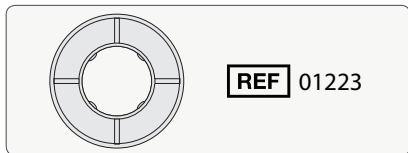

A Komfortgyűrű egy InsuJet™ kiegészítő. A Komfortgyűrű használata akkor javasolt, ha beadás közben az eszközzel való érintkezés kényelmetlen.

A Komfortgyűrű használatához fogja meg az eszköz első részét, és a Porlasztófejre helyezze fel a gyűrűt. Győződjön meg róla, hogy a gyűrű gömbölyű fele néz kifelé.

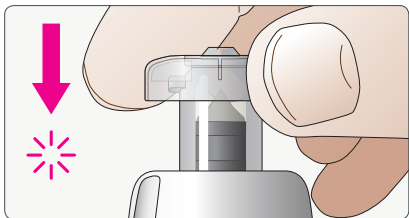

Nyomja rá a Komfortgyűrűt a Porlasztófejre, míg az a helyére nem ugrik.

Megjegyzések:

- A Komfortgyűrűt többszöri használatra tervezték. Cseréje akkor javasolt, ha a Porlasztófejre való csatlakozása meglazul.
- Higiénias okokból a Komfortgyűrű felhelyezése közben ne érjen hozzá kézzel a Porlasztófejhez.
- Használati hőmérsékleti határértékek

