



HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Az InsulinSaver egy olyan termék, amely azért lett kifejlesztve, hogy az inzulinnal kezelt cukorbetegnek képet kapjanak arról, hogy az inzulin milyen hőmérsékletnek volt vagy van kitéve.

Az InsulinSavert úgy állították be, hogy a számos inzulingyártó által meghatározott +2 és +30 fok hőmérsékleti tartományon kívül jelezzen.

Az InsulinSaver elem élettartama normál körülmények között 12-18 hónap. 12 hónap jótállás vonatkozik, amennyiben a készülék eleme nem merült le.



1. Jegyezze fel a dátumot:

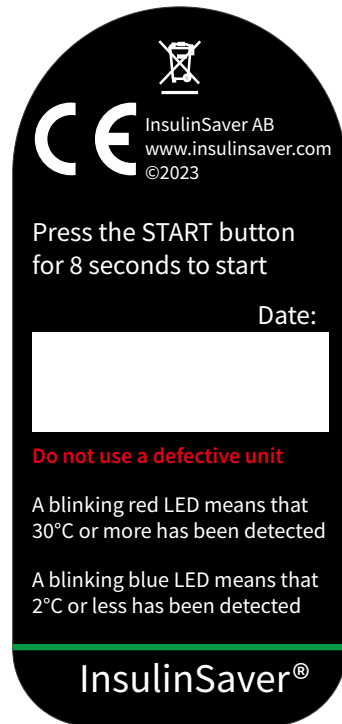


Jegyezze fel az InsulinSaver elindításának dátumát.

Jegyezze fel az InsulinSaver elindításának dátumát, hogy nyomon követhesse az akkumulátor élettartamát. Ezt megteheti az InsulinSaver hátoldalán.

2. Indítsa el az InsulinSavert:

Kb. 8 mp. után a zöld LED lámpa kigyullad.

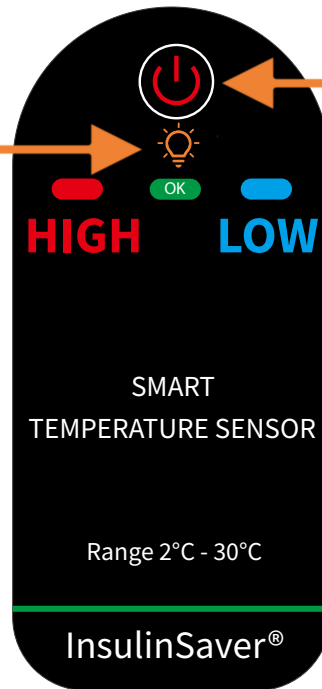


Tartsa nyomva a START gombot 8 mp-ig.

Az InsulinSaver indításához tartsa lenyomva a START gombot 8 másodpercig, mire a zöld LED felgyullad.


10 perc múlva az InsulinSaver elkezd rögzíteni és elemezni a hőmérsékletet.

3. Ellenőrizze, hogy az InsulinSaver működik-e:

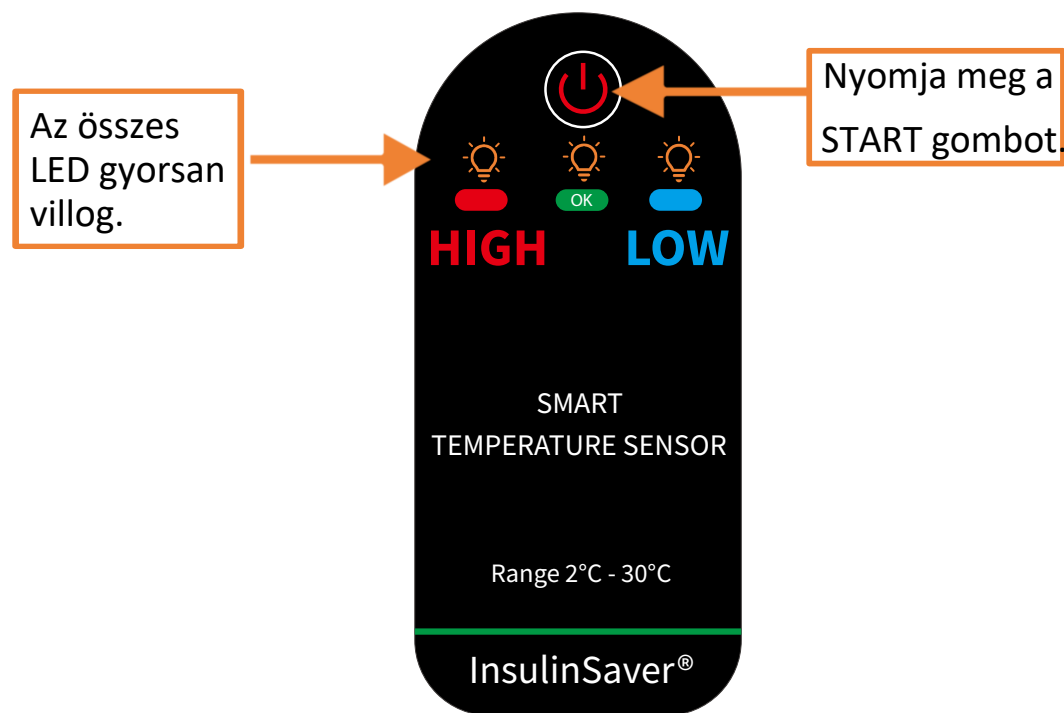

Nyomja meg a START gombot.
Ha az InsulinSaver működik,
mindhárom LED gyorsan villog.


4. Hogyan jelez az InsulinSaver:

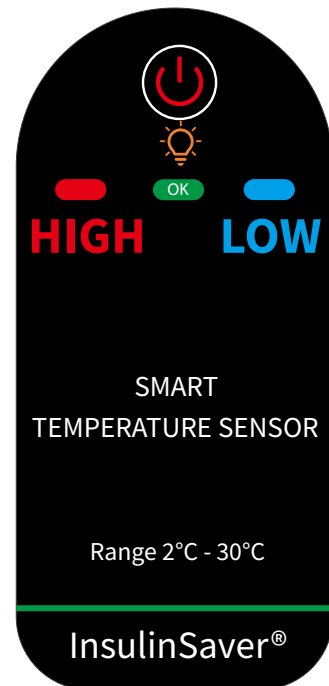

A középen lévő zöld LED azt jelzi, hogy az InsulinSaver megfelelően be lett kapcsolva.


Ahhoz, hogy ellenőrizze, hogy az InsulinSaver jól lett bekapcsolva és megfelelően működik, nyomja meg egyszer a START gombot.

Lásd 3. pont

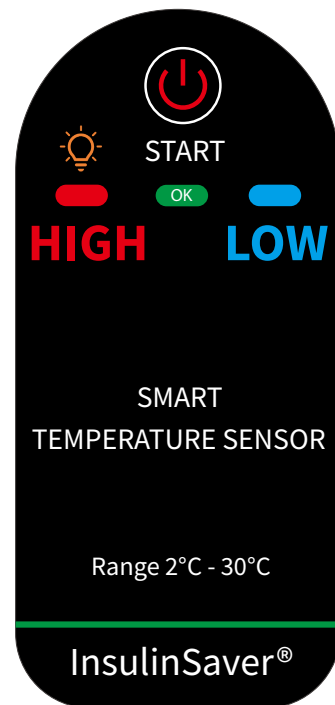

30°C feletti hőmérséklet


Ha az InsulinSaver 30°C feletti hőmérsékletnek volt kitéve, a piros LED folyamatosan villog.

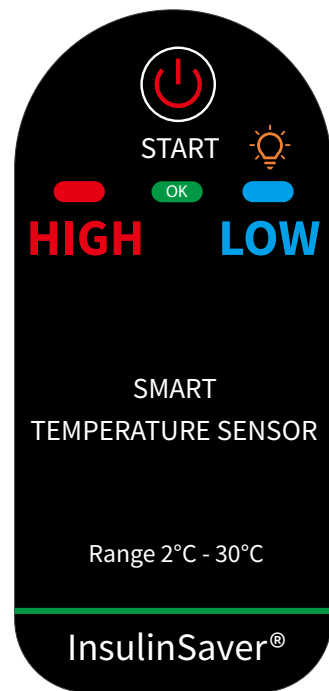

2°C alatti hőmérséklet

Ha az InsulinSaver 2°C alatti hőmérsékletnek volt kitéve, a kék LED folyamatosan villog.

5. Az InsulinSaver kikapcsolása/visszaállítása:

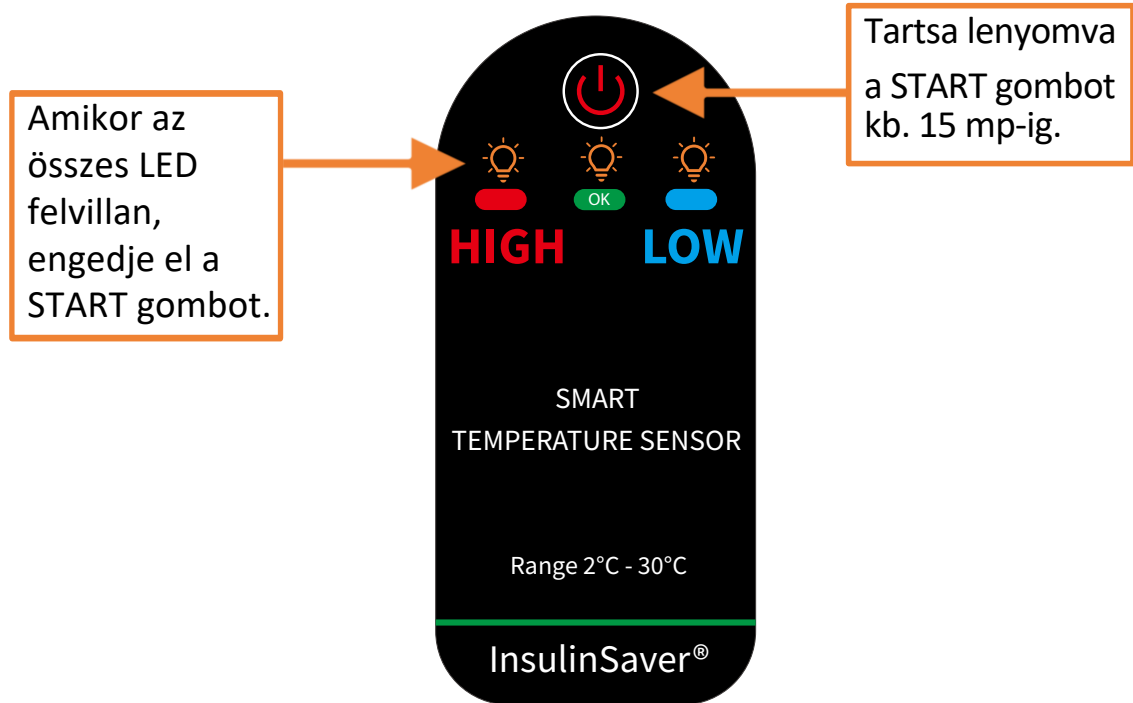


InsulinSaver kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot kb. 15 másodpercig. Amikor az összes LED felvillan, engedje el a START gombot.

Az összes riasztás törölve lesz.

Ha a készülék alaphelyzetbe állítása volt a cél, akkor most már újraindíthatja a készüléket (Lásd a 2. pont).

6. Ellenőrizze, hogy az InsulinSaver kikapcsolt állapotban van:

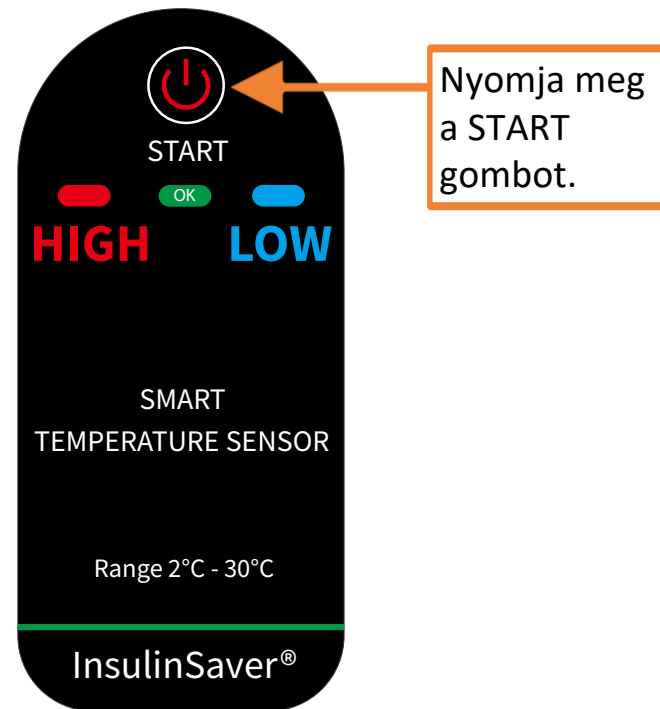

Nyomja meg START gombot egyszer.

Ha az InsulinSaver ki van kapcsolva, egyik LED sem villan fel.

FIGYELMEZTETÉS!

- Az InsulinSaver használata nem garantálja, hogy az inzulin minden esetben használható marad.
- Az InsulinSaver egy segédeszköz, amely segítséget nyújt az inzulin hőmérsékletének folyamatos figyelésében.
- Az InsulinSavert ne tegye ki erős ütésnek vagy erős nyomásnak.

HULLADÉKKEZELÉS

- Ne dobja az InsulinSaver készüléket a háztartási hulladéktárolóba.
- Az InsulinSavert elektronikai hulladékként kezelje.

Elemcsere: <https://cukromcukrom.hu/insulinsaver-elemcsere>

Az InsulinSaver eszközre 12 hónap jótállás vonatkozik.

Importőr: MedCordis Kft. 1134 Budapest, Csángó utca 36.
<https://cukromcukrom.hu/>